

Thealoz® Duo

Detta är en medicinteknisk produkt.
Läs bipacksedeln före användning.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

INDIKATION

THEALOZ DUO är en skyddande, återfuktande och smörjande behandling av måttligt till mycket torra ögon. För användning i ögonen.

LÄMPLIG FÖR

- Vuxna,
- Barn: föräldrar eller annan vuxen ska administrera ögondropparna,
- Kan användas under graviditet och amning baserat på nuvarande kunskap,
- Användare av alla typer av kontaktlinser.

KONTRAINDIKATIONER

Ska inte injiceras eller sväljas.
Använd inte THEALOZ DUO om du är allergisk mot något av innehållsämnen (se Produktbeskrivning).

PRODUKTBeskrivning

THEALOZ DUO är en lösning för användning i ögonen och innehåller trehalos (3%), hyaluronsyra som natriumhyaluronat (0,15%), natriumklorid, trometamol, väteklorid och vatten för injektionsvätskor. THEALOZ DUO är en steril, fosfatfri, hypoton och pH-neutral lösning.

THEALOZ DUO ögondroppar tillhandahålls i en ABAK®-multidosflaska. Detta innovativa och patenterade hjälpmedel möjliggör administrering ögondroppar genom ett 0,2 mikrometers filtermembran, vilket hindrar bakteriekontamination av lösningen utan användning av konserveringsmedel. THEALOZ DUO innehåller inte konserveringsmedel och är därför snäll mot ögonen och skyddar ögonvävnaden. Dessa ögondroppar orsakar inte heller någon reaktion hos användare som är känsliga mot konserveringsmedel.

NYTTA, EGENSKAPER OCH FUNKTION

THEALOZ DUO rekommenderas vid besvär av obehag, stickande/brännande känsla, känslan av skräp eller irritation i ögonen. Dessa besvär kan orsakas av:

- yttre faktorer såsom vind, rök, luftföroreningar, damm, soliga eller kalla förhållanden, torr värme, luftkonditionering, flygresor eller långa arbetspass framför en datorskärm;
- ögonoperationer som t.ex. synkorrigerande och gråstarsoperation.

THEALOZ DUO ger en omedelbar effekt som varar hela dagen och minskar symtomen av torra ögon, samt lindrar obehag som kan uppstå på ögats yta efter ögonoperation.

Ögats yta tolererar THEALOZ DUO väl och ögondropparna kan användas tillsammans med alla typer av kontaktlinser.

Huvudingredienserna i THEALOZ DUO är trehalos och hyaluronsyra.

Trehalos är en naturligt förekommande substans i många växter och djur som kan överleva i extremt torra miljöer. Trehalos har skyddande och återfuktande egenskaper. Hyaluronsyra förekommer naturligt i människans öga. Den återfuktar och smörjer genom att binda vatten samt fästa ögondropparna på ögats yta vilket ger en långvarig lindring och förkortar läkningstiden.

Den unika kombinationen av trehalos och hyaluronsyra i THEALOZ DUO ger långtidsverkande skydd, återfuktning och smörjning av ögats yta.

REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING

Dosering: 1 droppe i varje öga, 4-6 gånger dagligen.

THEALOZ DUO är enkel att använda.
Tvätta händerna noga före användning.
Använd inte något verktyg för att öppna flaskan.
När du använder THEALOZ DUO för första gången kommer den första droppen ut med en fördröjning på grund av filtersystemet i flaskan (se Produktbeskrivning).
Titta uppåt och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket med hjälp av pekfingret. Droppa en droppe i den fickan som formas mellan ögonvitan och nedre ögonlocket. Stäng ögat försiktigt efter applicering.
Sätt på locket igen efter användning.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Flerdosflaska för en patient.
För att undvika korskontamination ska flaskan inte användas av flera personer.
Kontrollera att förpackningen är obruten innan du använder flaskan för första gången.
Kontrollera att flaskans säkerhetsring är obruten innan du använder den för första gången.
För att undvika kontamination vidrör inte flaskans spets

med någonting eller mot någonting.
Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om dina symtom förvärras eller inte blir bättre.

VARNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Du ska inte köra eller använda maskiner om du får dimsyn efter att du använt ögondropparna: vänta några minuter tills din syn har blivit återställd.
Vänta minst 10 minuter mellan användning av två olika ögonprodukter.
THEALOZ DUO ska aldrig spädas ut eller blandas med någon annan lösning.
Flaskan kan läcka om flaskan utsätts för lågt atmosfäriskt tryck efter att den har öppnats för första gången.

BIVERKNINGAR

Följande biverkningar har rapporterats: lätt ögonirritation och röda ögon kan förekomma i sällsynta fall. Vid biverkningar i ögonen ska eventuella kontaktlinser tas ut.

Vid användning av ögondroppar kan man kortvarigt uppleva symtom så som brännande känsla, sveda, känslan av skräp i ögon och dimsyn.

Om du får någon biverkning eller upplever något oväntat efter att du använt denna produkt, tala med hälso- och sjukvårdspersonal och rapportera händelsen till den lokala distributören, tillverkaren eller LäkeMedelsverket (se kontaktinformation i slutet av bipacksedeln).


FÖRVARING OCH BORTSKAFFANDE

Förvaras mellan 8 °C och 30 °C.
Produkten ska skyddas mot direkt solljus och fukt.
Använd inte efter utgångsdatum som är angivet på flaskan och yttre kartongen.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad och avser produkt i oöppnad förpackning som är korrekt förvarad.
Ögondropparna kan användas upp till 6 månader efter att flaskan öppnats. Därefter ska flaskan kasseras även om det finns lösning kvar.

Produkten bör kasseras ansvarsfullt enligt gällande riktlinjer (flaskan kan sorteras som hushållsavfall, den yttre kartongen och bipacksedeln kan återvinnas).

Bipacksedelns versionsnummer och revideringsdatum:
Ver. 10 06/2022

Tillverkare:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrike
www.laboratoires-thea.com
Avsnitt « Contact us »

Distributör:









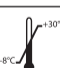





Théa Nordic AB, Storgatan 55, 70363 Örebro,
www.thea-nordic.com

Hälsovårdsmyndighet:

Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00, fax: 018-50 31 15
e-post:
meddev.central@mpa.se – www.lakemedelsverket.se

CE 0459

FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN

	Tillverkare		Medicinteknisk produkt
	Batchnummer		Läs bipacksedeln
	Tillverkningsdatum		En patient – flera doser
	Utgångsdatum		Använd inte om förpackningen är skadad
	Förvaringstemperatur		Varning
	Steriliserad aseptiskt		Skyddas mot solljus
	Förvaras torrt		Katalognummer
		Unik enhetsidentifierare	