

SV

Thealoz® Duo Gel

Detta är en medicinteknisk produkt.
Läs bipacksedeln före användning.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

INDIKATION

THEALOZ DUO GEL för skyddande, återfuktande och smörjande behandling av måttligt till mycket torra ögon. För användning i ögonen.

LÄMPLIG FÖR

- Vuxna,
- Barn: föräldrar eller annan vuxen ska administrera ögongelen,
- Kan användas under graviditet och amning baserat på nuvarande kunskap.

KONTRAIKATIONER

Ska inte injiceras eller sväljas.
Använd inte THEALOZ DUO GEL om du är allergisk mot något av innehållsämnen (se Produktbeskrivning).

PRODUKTBeskrivning

THEALOZ DUO GEL är en ögongel som innehåller trehalos (3 %), hyaluronsyra (som natrimhyaluronat, 0,15 %), karbomer (karbopol 974P, 0,25 %), sorbitol, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.
THEALOZ DUO GEL är en steril, fosfatfri, hypoton och pH-neutral ögongel.

THEALOZ DUO GEL innehåller inte konserveringsmedel och är därför snäll mot ögonen och skyddar ögonvävnaden. Denna ögongel orsakar inte heller någon reaktion hos användare som är känsliga mot konserveringsmedel.

NYTTA, EGENSKAPER OCH FUNKTION

THEALOZ DUO GEL rekommenderas vid besvär av obehag, stickande/brännande känsla, känslan av skräp eller irritation i ögonen orsakat av måttlig eller svår ögontorrhet. Dessa besvär kan orsakas av yttre faktorer såsom vind, rök, luftföroreningar, damm, soliga eller kalla förhållanden, torr värme, luftkonditionering, flygresor, långa arbetspass framför en datorskärm, samt ögonoperationer som t.ex. synkorrigering och gråstarrsoperation.

THEALOZ DUO GEL ger välbefinnande och långvarig symtomlindring vid torra ögon som beskrivet ovan.

De viktigaste innehållsämnen i THEALOZ DUO GEL är trehalos, hyaluronsyra och karbomer (karbopol 974P). Trehalos är en naturligt förekommande substans i många växter och djur som kan överleva i extremt torra miljöer. Trehalos har skyddande och återfuktande egenskaper.

Hyaluronsyra förekommer naturligt i människans öga. Den återfuktar och smörjer genom att binda vatten samt fästa gelen på ögats yta vilket ger en långvarig lindring och förkortar läkningstiden.

Karbomer gör att THEALOZ DUO GEL stannar kvar på ögats yta längre vilket ger långvarig lindring vid torra ögon och symtom av torra ögon.

Den speciella kombinationen av trehalos, hyaluronsyra och karbomer i THEALOZ DUO GEL ger långvarig återfuktning, smörjning och skydd av ögats yta.

REKOMMENDATIONER VID ANVÄNDNING

Dosering: 1 droppe i varje öga, 1-4 gånger dagligen. THEALOZ DUO GEL är särskilt lämpad för användning på kvällen i samband med att man går och lägger sig.

THEALOZ DUO GEL är enkel att använda.

Om du använder kontaktlinser ska du ta ut dem innan du använder THEALOZ DUO GEL.

Efter användning vänta minst 30 minuter innan du sätter i linserna igen.

Tvätta händerna noga före användning.

Öppna foliepåsen och riv av en endosbehållare (pipett).

Lägg tillbaka resten av pipetterna i foliepåsen.

Använd inte något verktyg för att öppna pipetten.

Vänd pipettens spets nedåt, skaka försiktigt/knäpp på pipetten så att gelen rinner ner.

Öppna pipetten genom att vrida av toppen.

För att undvika kontamination vidrör inte spetsen med någonting eller mot någonting.

Tryck ut en droppe gel.

Titta uppåt och dra försiktigt ned det nedre ögonlocket med hjälp av pekfingeret. Droppa en droppe i fickan som formas mellan ögonvitan och nedre ögonlocket. Stäng ögat försiktigt efter applicering.

Efter användning släng endospipetten även om det finns gel kvar. Spara inte pipetten.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera att förpackningen är obruten innan du börjar använda produkten: använd endast om påsarna och endospipetterna är öppnade.

För att undvika kontamination, vidrör inte spetsen med någonting eller mot någonting.

Öppnad endospipett ska inte återanvändas eftersom innehållet inte längre är skyddat mot mikrobiell kontamination.

Kontakta hälso- och sjukvårdspersonal om dina symtom förvärras eller inte blir bättre.

VARNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Du ska inte köra eller använda maskiner om du får dimsyn efter att du använt ögongelen: vänta några minuter tills din syn har blivit återställd.

Vänta minst 15 minuter mellan användning av två olika ögonprodukter. THEALOZ DUO GEL ska användas sist av produkterna.

BIVERKNINGAR

Följande biverkningar har rapporterats: i sällsynta fall kan lätt ögonirritation och röda ögon förekomma.

Vid användning av ögongel kan man kortvarigt uppleva symtom såsom brännande känsla, sveda, känslan av skräp i ögonen och dimsyn.

Om du får någon biverkning eller upplever något oväntat efter att du använt denna produkt, tala med hälso- och sjukvårdspersonal och rapportera händelsen till den lokala distributören, tillverkaren eller Läkemedelsverket (se kontaktinformation i slutet av bipacksedeln).

FÖRVARING OCH BORTSKAFFANDE

Förvaras mellan 8 °C och 30 °C.

Produkten ska skyddas mot direkt solljus och fukt.

Kasta endospipetten omedelbart efter användning även om det finns gel kvar.

Förvara de öppnade endospipetterna i påsen för att skydda dem mot ljus.

De öppnade endospipetterna kan användas upp till en månad efter att påsen öppnats.


Använd inte efter utgångsdatum som är angivet på endospipetterna och den yttre kartongen.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad och avser produkt i oöppnad förpackning som är korrekt förvarad.

Produkten bör kasseras ansvarsfullt enligt gällande riktlinjer (endospipetterna kan sorteras som hushållsavfall, den yttre kartongen och bipacksedeln kan återvinnas).

Bipacksedelns versionsnummer och revideringsdatum:
Ver. 9 06/2022

Tillverkare:

 Laboratoires Théa
12 rue Louis Blériot
63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 Frankrike
www.laboratoires-thea.com
Avsnitt « Contact us »

Distributör:















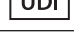
Théa Nordic AB,
Storgatan 55, 70363 Örebro,
www.thea-nordic.com

Hälsöförmyndighet:

Läkemedelsverket
Box 26, 751 03 Uppsala
Tel: 018-17 46 00, fax: 018-50 31 15
e-post: meddev.central@mpa.se – www.lakemedelsverket.se

CE 0459

FÖRKLARING TILL SYMBOLERNA PÅ FÖRPACKNINGEN

	Tillverkare
	Batchnummer
	Tillverkningsdatum
	Utgångsdatum
	Förvaringstemperatur
	Steriliserad aseptiskt
	Medicinteknisk produkt
	Läs bipacksedeln
	Engångsbruk
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Varning
	Skyddas mot solljus
	Förvaras torrt
	Katalognummer
	Unik enhetsidentifierare